

Gležanj

MD-SMALL JOINTS, MD-POLY

• SEKUNDARNE TOČKE

1

Anatomski orijentir:


- A) 2 cm ispod i iza medijalnog maleola na gornjem rubu pete
- B) Na unutarnjem rubu svoda 2 cm ispred i ispod medijalnog maleola
- C) Na rubu, između navikularne i medijalne kuneiformne kosti

MDs:

MD-Handfoot + MD-Tissue.

Kako ubrizgati:

5 mm, pod kutem od 90°.

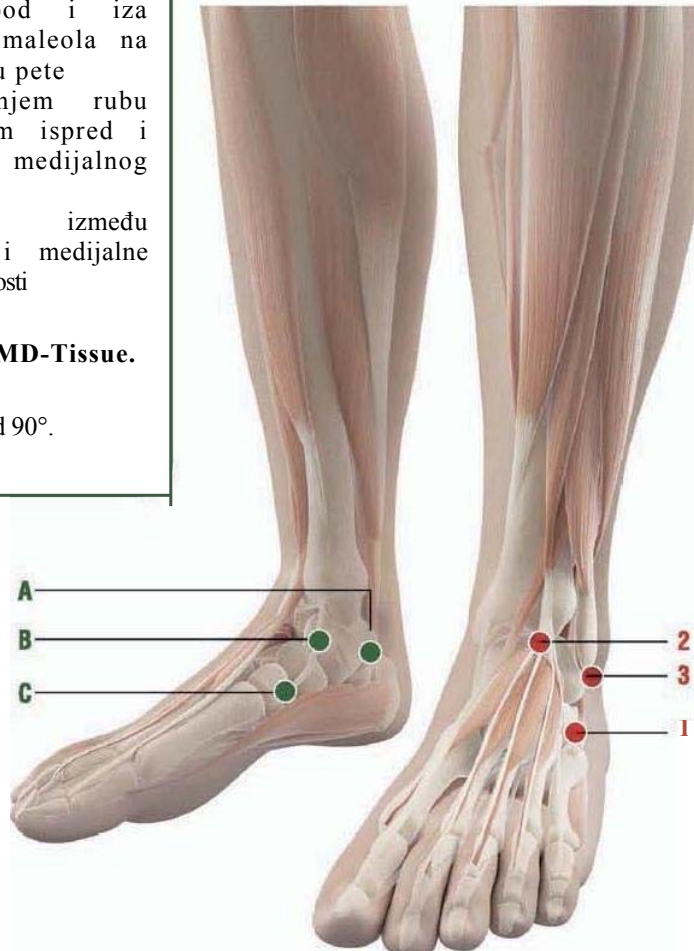

• GLAVNE TOČKE

1

Anatomski orijentir:

2 cm ispred lateralnog maleola na kalkaneo-kuboidnom zglobu.

Kako ubrizgati:

5 mm, pod kutem od 90°.

2

Anatomski orijentir:

Na sredini nabora svoda stopala odmah ispred tibije.

Kako ubrizgati:

5 mm, pod kutem od 90°.

3

Anatomski orijentir:

1 cm ispod i malo iza vanjskog maleola, odmah iznad pete

Kako ubrizgati:

5 mm, pod kutem od 90°.

Napomene:

Injekcije u dubine od 5 mm, pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na površinu kože (okomito), moraju biti aplicirane s iglom od 12-16 mm dužine, 25-28 G (Gauge) promjera.

Gležanj MD-SMALL JOINTS, MD-POLY

UPUTE ZA UPORABU I KOMBINACIJE S DRUGIM MD

- Ubrizgajte u **glavne točke**
- Bolovi uzrokovani čekičastim prstima: **MD-Small Joints + MD-Poly**
- Metatarzalna bol: **MD-Small Joints**
- Metatarzalna bol Mortonova neuroma: **MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Neural**

- Reumatoidni artritis stopala: **MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Matrix**
- Bol tetive uzrokovana dužom imobilizacijom: **MD-Small Joints + MD-Poly + MD-Matrix.**