

Nervus Ischiadicus

MD-ISCHIAL

• SEKUNDARNE TOČKE

Anatomski orijentir:

- A) Po sredini prednje strane nadkoljenice 20 cm iznad gornjeg ruba čašice.
- B) Po sredini prednje strane nadkoljenice 15 cm od gornjeg ruba čašice

MDs:

MD-Neural + MD-Matrix.

Kako ubrizgati:

i.m. ili s.c.


- C) Kada pacijent stoji ravno na lateralnoj strani nadkoljenice na mjestu gdje srednji prst dodiruje bedro

MDs:

MD-Neural + MD-Matrix.

Kako ubrizgati:

s.c.

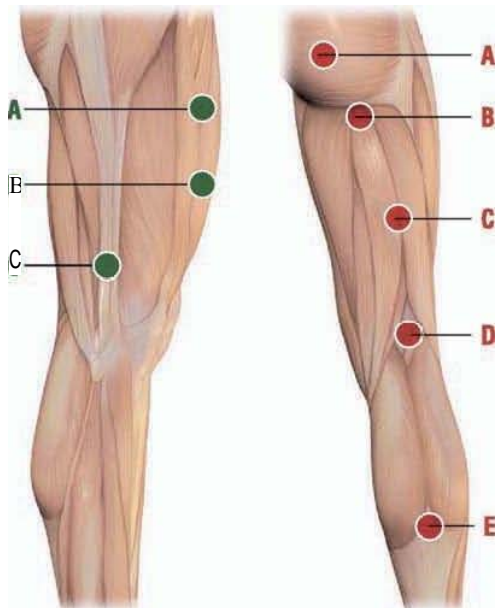

• GLAVNE TOČKE

Anatomski orijentir:

- A) Sredina mišića m. gluteus maximus, 5-6 cm lateralno od stražnje medijalne linije
- B) Sredina gluteo femoralne brazde
- C) Na stražnjoj strani bedra na pola puta između anatomske točke B, (vidi gore) i anatomske točke D, (vidi dolje).
- D) Sredina poplitealne jame
- E) Točka spajanja obje glave mišića m. gastrocnemius i tetive m. soleus
- F) 3-4 cm od vrha donjeg vanjskog maleonana stražnjoj strani gležnja.

Kako ubrizgati:

A, B i C : i.m

D:i.d, E, F: s.c.

Napomene:

Sve potkožne (s.c.) i intradermalne (i-d.) injekcije moraju biti s iglom dužine 12-16 mm, promjera 25-28 G (Gauge).

Sve intramuskularne (i.m.) injekcije moraju biti s iglom od dužine 40 mm, promjera 21 G (Gauge).

- Kada dajete subkutane injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 45 ° stupnjeva
- Kada dajete injekcije intradermalno, umetnite iglu pod kutem od oko 30 ° stupnjeva
- Kada dajete intramuskularne injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 90 ° stupnjeva

Nervus Ischiadicus MD-ISCHIAL

OSNOVNE UPUTE ZA UPORABU I KOMBINACIJE S DRUGIM MD

- Ubrizgajte u glavne točke

- Bolovi tipa ishijadičnog živca: **MD-Ischial**
- Lumbo ishijadična bol : **MD-Ischial + MD-Lumbar + MD-Neural**
- Bol u donjem lumbalnom dijelu kralježnice : **MD-Ischial + MD-Muscle**
- Perzistentna ishijadična bol uzrokovana operativnim zahvatom disk hernijacije L4-L5, L5-S1: **MD-Ischial + MD-Neural**
- Morton neuroma: **MD-Ischial + MD-Neural + MD-Tissue.**