

GUNA
MD COLLAGEN
M I L A N O

proizvod: **MD-MATRIX**

količina: **6-8 ml**

djelovanje tretmana:

Poboljšanje drenaže i detoksikacije tkiva



www.guna.hr

Tretmani pomoću igle:

Terapija na zahvaćenom području (iglom od 4 ili 13mm x30G) u svaki ubod 0,3 ml GUNA MD kolagena (MD-MATRIX).

- tehnika “PAPULA” /mikropapularis/ (iglom od 4 ili 13 mm x 30G)

Ostale terapijske metode:

- dermaroller, mezopen, mezopištolj
- mezoterapija bez igle - pri korištenju GunaPhoresis sadržaj ampule MD-MATRIX prije nanošenja pomiješajte s 1-2 ml provodljivog gela i uz pomoć navedenih aplikatora unesite ih subkutano

Dopunska terapija:

Mjesta uboda se nakon tretmana namažu kremom **TAMANU ARNICA** koja sadrži ljekovitu biljku arniku koja ima regenerativno i protuupalno djelovanje. Kod kuće se preporučuje nanošenje revitalizirajuće kreme **Natur 4** dva puta dnevno na liječena područja. Može se aplicirati na sve dijelove tijela.

Učestalost terapije iglom:

- 10 tretmana uz aplikacije jedanput tjedno, za održavanje: 1 tretman svaka 3 mjeseca

Učestalost terapije dermarollerom:

- 6-8 tretmana uz aplikacije dermarollerom veličine igle 1,50-3,00 mm jedanput u 3-6 tjedana



TEHNIKA ”PAPULA”

Unošenje GUNA MD kolagena (MD-MATRIX) pod kožu /subkutano/ ubadanjem u točke udaljenosti 1,5 cm na zahvaćenom području /mikropapularis/ (iglom 4 ili 13 mm x 30G). Iglu ubadamo do 3-4 mm. Tijekom svakog injektiranja unosimo 0,3 ml aktivne tvari.

■ MD-MATRIX + AKUPUNKTURNE TOČKE

U akupunkturne točke iglu (4 ili 13 mm x 30 G) ubodemo 3-4 mm duboko. Tijekom svakog injektiranja unosimo 0,3 ml aktivne tvari.

Mjerna jedinica **cun** je dužina srednjeg zgloba pacijentova prsta srednjaka. CUN je jedinica koja pomaže u lokalizaciji akupunkturnih točaka. Prije liječenja uspoređuju se vlastite mjere s cun mjerama, uz odgovarajuće korekcije koriste kod svakog pojedinog pacijenta.

- **Žučni mjehur 23 (GB23, Zhe Jin):** 3 cuna od središta pazuha, po središnjoj liniji pazuha, u 4. intercostalnom području te još 1 cun prema naprijed.
- **Želudac 37 (St37, Shang Ju Xu):** Uz savinuto koljeno, ispod patele, od lateralne udubine patele 6 cuna prema dolje, za dužinu palca lateralno od ruba tibie anterior.
- **Želudac 40 (St40, Feng Long):** Uz savinuto koljeno, ispod patele, od lateralne udubine patele 8 cuna prema dolje, za 2 dužine palca lateralno od ruba tibie anterior.
- **Želudac 44 (St 44, Nei Ting):** malo proksimalno od nabora između 2.i 3. prsta
- **Slezena 6 (SP6, San Yin Jiao):** u udubini proksimalno 3 cuna od vrha medijalne strane gležnja.
- **Debelo crijevo 11 (LI11, Qu Chi):** Nalazimo preko savijenog lakta malo lateralno između nabora i vrha lakta.

