

Lakat

MD-SHOULDER

• SEKUNDARNE TOČKE

Epicondylitis

1

Anatomski orijentir:
2-3 cm distalnije od glavne točke 2

MD: MD Muscle

Kako ubrizgati:

s.c. ili i.m. (u dubini od 5-6mm)

2


Anatomski orijentir:
Srednja točka pregiba lakta na medijalno od tetive bicepsa.

MDs:

MD-Matrix + MD-Tissue

Kako injicirati

s.c. ili i.d.

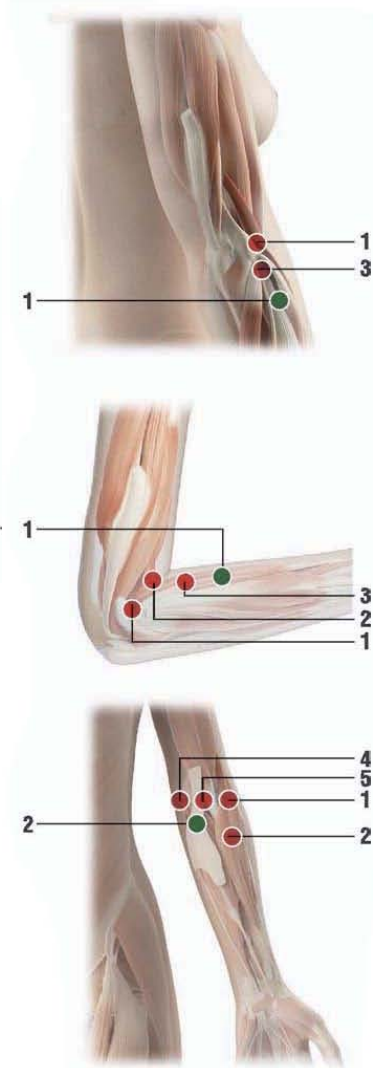

Napomene:

Sve potkožne (s.c.) i intradermalne (i.d.) injekcije moraju biti s iglom dužine 12-16 mm, promjera 25-28 G (Gauge).

Sve intramuskularne (i.m.) injekcije moraju biti s iglom od dužine 40 mm, promjera 21 G (Gauge).

- Kada dajete subkutane injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 45° stupnjeva
- Kada dajete injekcije intradermalno, umetnite iglu pod kutem od oko 30° stupnjeva
- Kada dajete intramuskularne injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 90° stupnjeva

Lakat - MD-SHOULDER

UPUTE ZA UPORABU I KOMBINACIJE S DRUGIM MD

- Ubrizgajte u glavne točke

- Epikondilitis Medicinski proizvodi injiciraju se u glavne i sporedne točke
- Epirohleitis
- De Quervain sindrom (stenozirajući tenosynovitis) **MD-Shoulder + MD-Neural**.

• GLAVNE TOČKE

Epicondylitis

1

Anatomski orijentir:

Lakat savijen pod kutem od 90°, neposredno ispred epikondila

MDs:

MD-Shoulder + MD-Matrix.

Kako ubrizgati:

s.c. pod kutem od 90° na površinu kože.

2

Anatomski orijentir:

Na vanjskom vrhu presavijenog lakta savijenog pod kutem od 90°.

MD: MD-Muscle.

3

Anatomski orijentir:

Točka 3 se nalazi 4 cm ispred točke 2 kada je lakat savijen pod kutem od 90°

MD: MD-Muscle.

Kako injicirati:

s.c. ili i.m. (u dubinu od 5-6 mm).

Epicondylitis

4

Anatomski orijentir:

Između medijalnog epikondila I olekranona

MDs:

MD-Shoulder + MD-Matrix.

Kako injicirati:

s.c. pod kutem od 90° na površinu kože.

5

Anatomski orijentir:

Na unutarnjem vrhu presavijenog lakta savijanog pod kutem od 90°.

MD: MD-Muscle.

Kako ubrizgati:

s.c. ili i.m. (u dubinu od 5-6 mm).