

Kuk

MD-HIP

• SEKUNDARNE TOČKE

1

Anatomski orijentir:


8 cm iznad lateralnog femoralnog kondila

MD: MD-Muscle

Kako ubrizgati:

Im. U dubinu od 1 cm, umetnuti iglu pod kutem od 90° stupnjeva na površinu kože.

- Alternativa: sc.

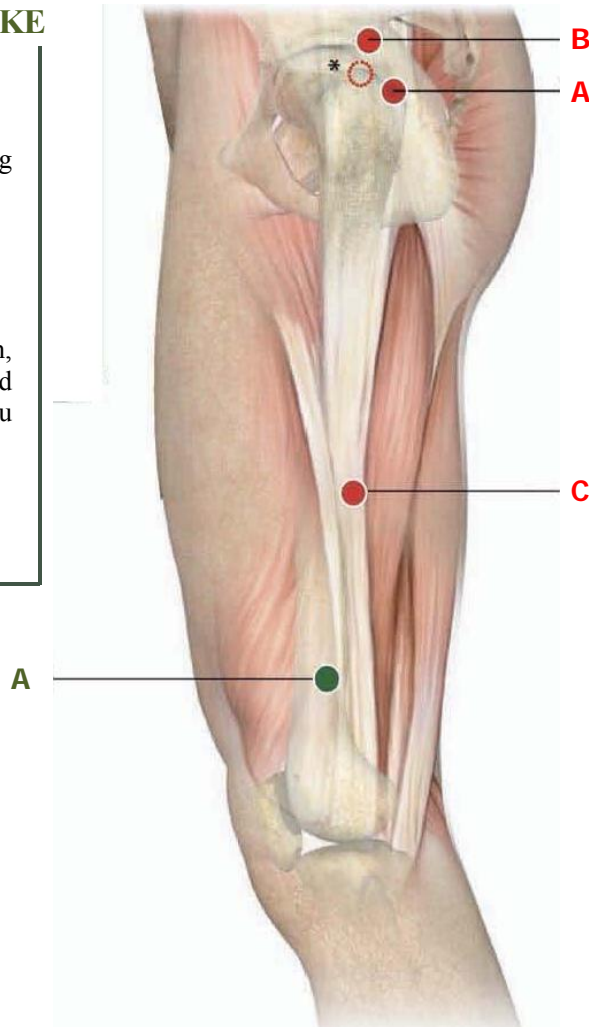

• GLAVNE TOČKE

Anatomski orijentir:

A) Stražnji rub velikog trohantera kod pacijenta u ortostatskoj poziciji sa sastavljenim nogama. Kod pacijenata koji leže na zdravoj strani, anatomski orijentir je na vrhu velikog trohantera.

B) 2 cm iznad i ispred od najvišemargine velikog trohantera (anatomski orijentir A)

C) Pacijent u ortostatskoj poziciji: gornji ekstremitet je uz tijelo, točka je na bedru na mjestu dodira vrha srednjeg prsta.

Kako ubrizgati:

Za A) i B) i.a.

Alternativa:

Za A) i B): i.m. u dubinu od 2cm; igla inklinirana prema zglobu kuka.

Za C): i.m. u dubinu od 1 cm; injicirati pod kutem od 90° na površinu kože.

Napomena:

Sve potkožne (s.c.) injekcije moraju biti s iglom dužine 12-16 mm, promjera 25-28 G (Gauge).

Sve intramuskularne (i.m.) injekcije moraju biti s iglom od dužine 40 mm, promjera 21 G (Gauge).

Intraartikularna aplikacija mora biti izvedena posebnom iglom

- Kada dajete subkutane injekcije, umetnite iglu pod kutem od oko 45° stupnjeva
- Kada dajete intramuskularne injekcije, umetnite iglu kutem od oko 90° stupnjeva

Kuk – MD-HIP

UPUTE ZA UPORABU I KOMBINACIJE S DRUGIM MD

- Ubrizgajte u **glavne točke**

- Osteoartritis kuka: **MD-Hip**
- Upala zglobne čahure kuka: **MD-Hip + MD-Matrix**
- Reumatoidni artritis kuka: **MD-Hip + MD-Poly**
- Bol u kuku mišićne etiologije: **MD-Hip + MD-Muscle + MD-Neural**
- Bol u kuku neuralne etiologije (burning hip): **MD-Hip + MD-Neural**.
- Bol u kuku uzrokovana duljim ležanjem: **MD-Hip + MD-Matrix + MD-Tissue**