

GUNA
MD COLLAGEN
M I L A N O

**PREPORUČENI KORACI
TRETMANA UNOSA MD-TISSUE,
MD-MATRIX POMOĆU UREĐAJA**



www.guna.hr

Prije početka tretmana važan je razgovor i dogovor s klijentom.

Za postizanje željenih rezultata preporučamo:

- 6-8 tretmana svaki tjedan ili svaki drugi tjedan.
- Nakon 3-6 mjeseci s dva-tri tretmana za održavanje osvježavamo i produžujemo učinak.

Posebno važno:

- završetak dijagnoze tipa kože
- struktura programa njege kože
- odabir načina unosa aktivne tvari
- odabir odgovarajućih Guna MD kolagena (MD-TISSUE, MD-MATRIX)
- Svi tretmani započinju **čišćenjem lica**.
- **Pilingom** se uklanja površinski sloj mrtvih stanica kože koje tenu daju umoran izgled i sivi ton. Na taj način možemo pojačati učinkovitost upijanja preparata.
- **Unos aktivnih tvari pomoću GunaPhoresis:** pomiješamo 2 ml MD-TISSUE (tretman lica i podizanja grudi) ili 2 ml MD-MATRIX (tretman za celulit) ili 2 ml 2 ml MD-TISSUE i 2 ml MD-MATRIX (tretman za poticanje rasta kose) ili 2 ml 2 ml MD-TISSUE i 2 ml MD-MATRIX (tretman za ruke), sa 1-2 ml provodljivog gela; time možemo doprijeti do dubljih slojeva kože uređajima za ultrazvuk i iontoforezu.
- **Masažom lica** potiče se cirkulacija, koža postaje zategnutija, čvršćeg i vedrijeg izgleda.
- **Maskom** se postiže dubinsko čišćenje i detoksikacija kože koja poprma mlađi i svježiji izgled.
- Tretman završava **hidratacijom**, što je vrlo bitno bez obzira na tip kože. Odabir odgovarajuće kreme zaokružuje cijeli proces njege lica.
- **Njega kod kuće** : preporučujemo Guna kreme **STAMIBIO BEAUTY** te **STAMIBIO SERUM**.

