

**GUNA**  
MD COLLAGEN  
M I L A N O

proizvod: **MD-MATRIX** količina: **2 ml**

djelovanje tretmana: **Poboljšanje drenaže i detoksikacije tkiva**

proizvod: **MD-TISSUE** količina: **2 ml**

djelovanje tretmana: **Regeneracija tkiva**

#### Tretmani pomoću igle:

Terapija na zahvaćenom području (iglom od 4 ili 13mm x30G) u svaki ubod 0,2-0,3 ml GUNA MD kolagena (MD-TISSUE i MD-MATRIX).

- tehnika **“PAPULA”** /subkutano/ (iglom od 4 ili 13 mm x 30G)
- tehnika **“NAPPAGE”** /intradermalno/ (iglom od 4 ili 13 mm x 30G)

#### Ostale terapijske metode:

- dermaroller, mezopen, mezopištolj
- mezoterapija bez igle - pri korištenju GunaPhoresis sadržaj ampule MD-TISSUE i MD-MATRIX prije nanošenja pomiješajte s 1-2 ml provodljivog gela i uz pomoć navedenih aplikatora unesite ih subkutano

#### Dopunska terapija:

Mjesta uboda se nakon tretmana namažu kremom **Tamanu Arnica** koja sadrži ljekovitu biljku arniku koja ima regenerativno i protuupalno djelovanje. Kod kuće se preporučuje nanošenje **STAMIBIO LOSIONA** koji pomaže u procesu obnavljanja vlasišta, ublažava svrbež, te pomaže u smanjenju crvenila i iritacije.

#### Učestalost terapije iglom:

- 6-10 tretmana uz aplikacije jedanput tjedno ili jedanput u dva tjedna do željenog učinka

#### Učestalost terapije dermarollerom:

- 6-8 tretmana uz aplikacije dermarollerom veličine 0,5 mm jedanput u 3-6 tjedana



**MED Balance**  
I N N O V A T I O N  
Authorized distributor - Croatia

[www.guna.hr](http://www.guna.hr)

**GUNA**  
MD COLLAGEN  
M I L A N O

proizvod: **MD-MATRIX** količina: **2 ml**

djelovanje tretmana: **Poboljšanje drenaže i detoksikacije tkiva**

proizvod: **MD-TISSUE** količina: **2 ml**

djelovanje tretmana: **Regeneracija tkiva**

#### **TEHNIKA "PAPULA"**

Unošenje GUNA MD kolagena (MD-TISSUE, MD-MATRIX) pod kožu /subkutano/ ubadanjem u točke na zahvaćenom području /mikropapularis/ (iglom 4 ili 13 mm x 30G). Tijekom svakog injektiranja unosimo 0,2-0,3 ml aktivne tvari.



#### **TEHNIKA "NAPPAGE"**

/intradermalno/, na udaljenosti od 1-1,5 cm kontinuirano injektirati (iglom od 4 ili 13 mm x 30G) Guna MD kolagen (MD-TISSUE, MD-MATRIX). Početni korak je skidanje pokrova igle na taj način da vrh igle ostane vani u dužini od 1 mm. Ponavljani točkasti ubod se izvodi simultano okomito.

